

Lertal[®]

spray



UPUTSTVO ZA UPOTREBU MEDICINSKOG SREDSTVA

Lertal[®] spray je sterilan oftalmološki rastvor koji sadrži natrijum-hijaluronat, lipozome i suvi ekstrakt semena crne koprive (*Perilla frutescens B.*). Zbog osobina da umiruje, osvežava i vlaži suve, iritirane i crvene oči primenjuje se kao dopuna antihistaminske terapije.

Udruženo dejstvo lipozoma i natrijum hijaluronata (soli hijaluronske kiseline) pomaže u obnovi i poboljšanju stabilnosti suznog filma lipida, tako što površinu oka održava hidriranom i vlažnom.

Suvi ekstrakt *Perilla-e*, zahvaljujući svojim svojstvima, pomaže u olakšavanju simptoma iritacije oka.

Namena

Koristi se kao dopuna u terapiji alergijskog konjunktivitisa; pruža osećaj olakšanja kod suvih, iritiranih i crvenih očiju:

- osvežava i olakšava simptome iritacije oka
- sprečava dehidraciju površine oka
- uspostavlja homeostazu površine oka i suznog filma, izmenjenu usled stresa izazvanog delovanjem spoljašnjih faktora poput klima uređaja, izlaganja vetru, prašini, alergenima, zagađenju i napora oka usled produžene upotrebe kontaktnih sočiva, kompjutera, lošeg osvetljenja itd.

Uputstvo za upotrebu

- Pre upotrebe dobro operite ruke.
- Držite bočicu čvrsto, sa palcem ili kažiprstom na mlaznici vodeći računa da ne zapušite otvor na njoj.
- Bočicu udaljite približno 10 cm od oka.
- Jakim pritiskom na mlaznicu raspršite rastvor na zatvoreno oko.
- Raspršite rastvor jednom ili dva puta prilikom svake primene.
- Upotreba ovog proizvoda se preporučuje tri ili četiri puta dnevno, tokom tri ili četiri uzastopna dana.
- Pre nanošenja ovog proizvoda, skinite kontaktna sočiva.



Upozorenja

- U slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka nemojte koristiti ovaj proizvod.
- U slučaju iritacije, prekinite upotrebu i obratite se lekaru.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je pakovanje oštećeno.
- Ne gutati.
- Držati dalje od vidokruga i domašaja dece.
- Proizvod treba čuvati dalje od izvora toplote, na suvom mestu, na temperaturi od 2 do 25°C.
- Ne dodirivati površinu oka mlaznicom.
- Propisno zatvoriti nakon upotrebe.
- Proizvod se može koristiti najviše 28 dana nakon prvog otvaranja.
- Ne koristite proizvod nakon isteka datuma naznačenog na bočici.

Sastav

PER-LIP®, natrijum-hijaluronat, dinatrijum-edetat, PHMB, PEG-400, borna kiselina, natrijum-tetraborat, voda.

Broj rešenja o registraciji: 515-02-04148-23-004 od 14.12.2023.

Ovlašćeni predstavnik:

BONIFAR DOO NOVI BEOGRAD

Bulevar Zorana Đinđića 64a

Datum revizije teksta: Decembar, 2023.

Lertal®

spray

10 mL

 NTC Srl
Via Luigi Razza, 3
20124 Milano, Italija

 ntc
Novelty. Technology. Care.

 0426

 STERILE A



LPES01501